

« BIRTH  
ALARM »

*the original product*

# Birth Alarm Lite

DE Bedienungsanleitung



Wir danken Ihnen herzlich für den Erwerb des Birth Alarm Lite. Dies ist ein verlässliches Meldesystem für Fohlengeburten. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durchzulesen. Die gute Montage und Bedienung sind für die ordentliche Funktion unerlässlich.



## Inhalt

1.	Einleitung	5
2.	Verpackungsinhalt	5
3.	Gebrauchsfertig machen	7
3.1	Erster Einsatz	7
3.2	Ein- und ausschalten	7
4.	Die Lampen auf dem Birth Alarm Lite	9
4.1	Das Statuslämpchen	9
4.2	Das GSM-Lämpchen	10
5.	Das Innere des Birth Alarm Lite	11
5.1	Einsetzen/Auswechseln der Batterien	11
5.2	Gehäuse des Birth Alarm Lite	12
5.3	Einstecken der SIM-Karte	12
6	Installation einer neuen SIM-Karte	13
7	Programmieren von Rufnummern	15
7.1	Der Programmiermodus	15
7.2	Programmieren von Rufnummern	15
7.2.1	Programmieren mit "SMS"	17
7.2.2	Direktprogrammierung	18
8	Tests	20
9	Befestigung an der Stute	22
9.1	Befestigung unter dem Halfter	23
9.2	Befestigung an einem Antirollgurt	24
10	Zusammenfassung und Nutzung.	25
11	Technische Daten	27



## 1. Einleitung

Wenn Ihre Stute kurz vor der Geburt steht, möchten Sie gern dabei ein, um bei Komplikationen eingreifen oder einen Tierarzt hinzuziehen zu können. Pferde und Ponys liegen beim Abfohlen gern ganz ausgestreckt auf der linken oder rechten Seite. Auf diese Weise haben sie mehr Platz bei den Presswehen. Der Birth Alarm Lite macht sich diese Eigenschaft zunutze. Wenn Sie den Birth Alarm Lite ganz einfach unter dem Halfter Ihrer Stute (oder an einem Antirollgurt) anbringen, warnt er Sie, sobald die Geburt beginnt.

## 2. Verpackungsinhalt

1. **Der Birth Alarm Lite - Geburtsmelder.**
2. **Der spezielle Halter** (hier wird der Birth Alarm Lite eingeschoben). Dieser Halter kann entweder unter dem Halfter Ihrer Stute oder auch im Ring des Antirollgurts befestigt werden.
3. **Kabelbinder.** Um beginnen zu können, haben wir einige Kabelbinder (auch als "Tie Wraps" bezeichnet) mitgeliefert. Diese Kabelbinder sind zur einmaligen Verwendung vorgesehen, sind aber auch bei jedem Baumarkt erhältlich.
4. **Der Spezial-Schraubenzieher.** Einerseits können Sie hiermit Ihren Birth Alarm Lite aufschrauben (beispielsweise zum Auswechseln der Batterien oder zum Einstecken/Herausnehmen Ihrer SIM-Karte). Auf der Rückseite dieses Schraubenziehers befindet sich außerdem ein starker Magnet. Damit können Sie den Birth Alarm Lite bedienen.
5. **SIM-Kartenpaket.** Dieses Paket enthält die benötigten Servicenummern sowie den PIN-Code und den PUK-Code der SIM-Karte. *(Es kann sein, dass Ihr Birth Alarm Lite ohne SIM-Karte/SIM-Paket geliefert wurde. Das richtet sich nach dem Land, in dem Sie wohnen)*

6. **Dokumentation.** Ihr Birth Alarm Lite ist von drei Arten von Dokumenten begleitet. Nämlich
- a. **Kurzanleitung**
  - b. **List für das Troubleshooting** (diese Kontroll-Liste kann zum Einsatz gelangen, wenn Probleme bei der Nutzung des Birth Alarm Lite auftreten)





## 3. Gebrauchsfertig machen

### 3.1 Erster Einsatz

Vor der ersten Nutzung des Birth Alarm Lite ist Folgendes zu tun:

- Den Birth Alarm Lite aufschrauben und das rote Etikett entfernen, das sich am Pol einer der Batterien befindet. Jetzt haben die Batterien Kontakt mit dem Birth Alarm Lite.
- Je nach dem Land, in dem Sie wohnen, ist die SIM-Karte möglicherweise schon mitgeliefert worden.
  - Wenn das der Fall ist, dann befindet sich diese bereits im SIM-Halter unter dem Batteriefach *(siehe 5.3)*
  - Andernfalls müssen Sie die SIM-Karte selbst kaufen und einstellen. Sie muss dann aktiviert und in den SIM-Halter eingesteckt werden. *(siehe 5.3)*
- Das Kapitel "Installation einer neuen SIM-Karte" *(siehe 6)* erläutert, wie man eine neu angeschaffte SIM-Karte selbst einstellt und installiert.

Wenn Sie diese Arbeitsschritte bei Ihrem neuen Birth Alarm Lite durchgeführt haben, können Sie das Gerät wieder zuschrauben und mit der Einstellung fortfahren.



*Wenn Ihr Mobiltelefon im Stall oder auf der Weide, auf der die Stute steht, einen guten Empfang hat, empfehlen wir Ihnen, eine SIM-Karte vom gleichen Provider zu kaufen..*



### 3.2 Ein- und ausschalten

Mit der Rückseite des mitgelieferten Spezial-Schraubenziehers können Sie den Birth Alarm Lite ein- und ausschalten beziehungsweise bedienen.





Beim Einschalten des Birth Alarm Lite geht man wie folgt vor:



- Die Rückseite des Schraubenziehers gegen den roten Block (  ) beim  -Symbol halten, das sich seitlich auf dem Birth Alarm Lite befindet.
- Daraufhin leuchtet das Statuslämpchen grün auf. Nun nimmt man den Schraubenzieher wieder weg.
- Damit ist der Birth Alarm Lite aktiv und kann an der Stute befestigt werden.

Beim Ausschalten des Birth Alarm Lite geht man wie folgt vor:



- Die Rückseite des Schraubenziehers wiederum gegen den roten Block (  ) beim  -Symbol halten, das sich seitlich auf dem Birth Alarm Lite befindet.
- Daraufhin leuchtet das Statuslämpchen rot auf. Nun nimmt man den Schraubenzieher wieder weg.
- Damit ist Birth Alarm Lite ausgeschaltet.

## 4. Die Lampen auf dem Birth Alarm Lite







### 4.1 Das Statuslämpchen



Das Statuslämpchen ist das Lämpchen ganz außen seitlich auf dem Birth Alarm Lite. Hierbei handelt es sich um ein Speziallämpchen mit drei verschiedenen Farben. Es kann blau, rot oder grün aufleuchten. An der Blinkreihenfolge des Statuslämpchens kann man den Status des Birth Alarm Lite ablesen. Beispielsweise: Wenn das Lämpchen grün blinkt, ist mit dem Birth Alarm Lite alles in Ordnung. Wenn das Statuslämpchen jedoch rot blinkt, ist ein Batteriewechsel erforderlich.

Wenn der Birth Alarm Lite anruft, können Sie dem Statuslämpchen auch einige Informationen entnehmen. Wenn das Lämpchen abwechselnd blau und rot blinkt, dann bedeutet dies, dass der Bereich schlecht ist. Wenn das Lämpchen abwechselnd gelb/blau oder grün/blau blinkt, dann ist der Bereich mäßig bis gut! Der nachstehenden Tabelle ist zu entnehmen, was die normalen Leuchtsignale bedeuten.

*Abb. 1. : Normale Leuchtsignale des Statuslämpchens*

Leuchtsignal LED	Bedeutung
	Standby, Batterie o.k.
	Standby, Batterie schwach
	GSM aktiv, Verbindung wird hergestellt
	GSM aktiv, schlechter Netzempfang
	GSM aktiv, mäßiger Netzempfang
	GSM aktiv, guter Netzempfang



## 4.2 Das GSM-Lämpchen



Neben dem Statuslämpchen gibt es seitlich auf dem Birth Alarm Lite auch noch ein Lämpchen mit der Bezeichnung "GSM". Dieses Lämpchen leuchtet nur dunkelgelb auf. Dieses Lämpchen ist direkt an das interne GSM des Birth Alarm Lite angeschlossen und leuchtet auch nur dann auf, wenn das interne GSM des Birth Alarm Lite aktiv wird.

Beim GSM-Lämpchen sind kurzerhand drei Situationen möglich:


- Das GSM sucht eine Netzwerkverbindung (schnelles Blinken)
- Das GSM hat eine Netzwerkverbindung (langsames Blinken)
- Das GSM ruft an (das Lämpchen leuchtet während des Anrufs durchgehend)

Das GSM-Lämpchen dient nur zur Unterstützung; normalerweise gelangt in erster Linie das Statuslämpchen zum Einsatz.

## 5. Das Innere des Birth Alarm Lite

Wenn Sie den Birth Alarm Lite aufschrauben, sehen Sie die folgenden wichtigen Teile:

1. Batterien
2. SIM-Karte / SIM-Kartenhalter
3. Statuslämpchen
4. GSM-Lämpchen

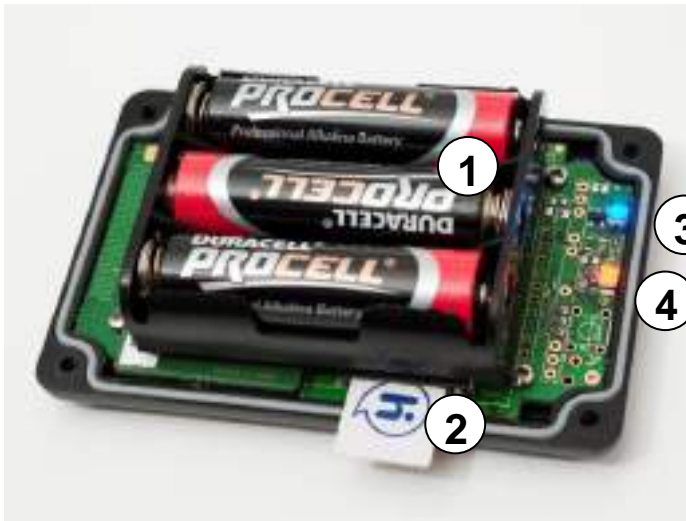


### 5.1 Einsetzen/Auswechseln der Batterien

Beim Auswechseln der Batterien im Birth Alarm Lite sind Alkali-Batterien zu verwenden (vorzugsweise “Duracell” oder “Panasonic”). Aufladbare Batterien sollten nicht zum Einsatz gelangen. Immer gleich den ganzen Satz Batterien auswechseln, also alle drei gleichzeitig! Wenn sich die Batterien nicht mit den Fingern herausnehmen lassen, kann man vorsichtig einen kleinen Schraubenzieher verwenden.

Die Batterien müssen jeweils so eingesetzt werden, dass der Minuspol der Batterie mit der Feder Kontakt hat.

 *Setzen Sie zu Beginn der Fohlensaison unbedingt neue Batterien ein!*

 *Wenn Sie den Birth Alarm Lite längere Zeit nicht verwenden möchten, beispielsweise nach dem Ende der Fohlensaison, können Sie am besten die Batterien entnehmen, damit diese nicht lecken und Ihren Birth Alarm Lite beschädigen.*

## 5.2 Gehäuse des Birth Alarm Lite

Das Gehäuse des Birth Alarm Lite ist so konzipiert, dass es sich nur in einer einzigen Weise zuschrauben lässt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das Statuslämpchen und das GSM-Lämpchen sichtbar sind.

## 5.3 Einstecken der SIM-Karte

Die SIM-Karte muss mit dem Chip nach unten in den Birth Alarm Lite eingesteckt werden. Dabei ist auch auf die schräge Seite der SIM-Karte zu achten. Diese muss beim Einstecken der SIM-Karte nach vorn zeigen.

Die SIM-Karte in den Halter einschieben, bis es klickt. Dann lässt man die SIM-Karte wieder los. Damit befindet sich die SIM-Karte im Halter und der Birth Alarm Lite ist einsatzbereit. Wenn Sie die SIM-Karte wieder aus dem Halter nehmen möchten, drücken Sie vorsichtig gegen die SIM-Karte an, bis es wiederum klickt. Wenn Sie jetzt die SIM-Karte wieder loslassen, springt sie von selbst nach vorn und lässt sich leicht entnehmen.





## 6 Installation einer neuen SIM-Karte

Je nach dem Land, in dem Sie wohnen, ist die SIM-Karte möglicherweise schon mit dem Birth Alarm Lite mitgeliefert worden. In diesem Fall befindet sich die SIM-Karte bereits im SIM-Kartenhalter. Andernfalls müssen Sie selbst eine SIM-Karte anschaffen.

Kaufen Sie eine Prepaid-SIM-Karte (oder auch eine SIM-Karte mit einem kostengünstigen Sim-Only Abonnement) in Ihrem Mobiltelefongeschäft. Wählen Sie vorzugsweise einen Provider, von dem Sie wissen, dass er an dem Standort, wo Sie den Birth Alarm Lite verwenden möchten, eine gute Deckung bietet.

Wenn Sie eine SIM-Karte angeschafft haben, muss diese noch aktiviert werden. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

- Die neue SIM-Karte in Ihr eigenes Gerät einstecken.
- Wenn Ihr Gerät nach dem Einschalten nach einem "PIN-Code" fragt, geben Sie diesen ein. Der PIN-Code ist dem Büchlein oder dem Schreiben zu entnehmen, das mit Ihrer SIM-Karte mitgeliefert wurde. Übrigens lautet der PIN-Code in den meisten Fällen "0000".
- Versuchen Sie nun einmal, mit dem Gerät einen Anruf zu tätigen. Möglicherweise hören Sie, bevor das Telefon klingelt, eine Art von Willkommensgruß von Ihrem Provider, der Sie begrüßt, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden. Diese Nachricht ganz bis zum Ende abhören.
- Nun ist sicherzustellen, dass die Voicemail der SIM-Karte ausgeschaltet ist. Dazu wählen Sie mit einem anderen Gerät die Nummer der SIM-Karte. Wenn Sie nach einiger Zeit mit einem Voicemail-Service verbunden werden, ist die Mailbox der SIM-Karte also aktiv. In diesem Fall müssen Sie selbst die Voicemail ausschalten, indem Sie den Kundenservice des Providers anrufen oder indem Sie einen bestimmten Ausschaltcode eingeben. Die Einzelheiten zum



Ausschalten der Voicemail sind bei jedem Provider wieder anders; diese sind der Bedienungsanleitung für die SIM-Karte zu entnehmen.

- Wenn Sie beim Einschalten des Geräts um einen PIN-Code gebeten werden, muss diese PIN-Code-Sicherung ausgeschaltet werden. Die entsprechenden Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung für Ihr Gerät zu entnehmen.
- Überprüfen Sie das Telefonguthaben der SIM-Karte. Dazu rufen Sie den Service für das Telefonguthaben/den Aufwertungsservice Ihres Providers an. Sorgen Sie dafür, dass mindestens € 10,00 auf der Karte stehen. Ein unzureichendes Telefonguthaben muss aufgewertet werden, indem Sie eine Guthabekarte kaufen (erhältlich an zahlreichen Verkaufsstellen).

Wenn Sie alle Schritte durchlaufen haben, ist die neue SIM-Karte einsatzbereit und kann in den Birth Alarm Lite eingesteckt werden. ([siehe 5.3](#))






## 7 Programmieren von Rufnummern

Um die Einstellungen Ihres Birth Alarm Lite ändern zu können, müssen Sie das Gerät auf den Programmiermodus einstellen.

### 7.1 Der Programmiermodus

Um den Birth Alarm Lite direkt programmieren zu können, geht man wie folgt vor:

- Die Rückseite des Schraubenziehers **einige Sekunden lang** gegen den roten Block (  ) beim  -Symbol halten, das sich seitlich auf dem Birth Alarm Lite befindet. Dabei leuchtet das Statuslämpchen erst dreimal grün auf und wird dann blau.
- Wenn das Statuslämpchen blau aufleuchtet, können Sie den Schraubenzieher wegnehmen.
- Damit befindet sich der Birth Alarm Lite im Programmiermodus

 *Wenn Sie mit dem Programmieren fertig sind, warten Sie 2-3 Minuten. Der Birth Alarm Lite verlässt den Programmiermodus von selbst wieder und kehrt in den Normalzustand zurück. Der Birth Alarm Lite ist dann ganz normal eingeschaltet und wieder einsatzbereit.*

### 7.2 Programmieren von Rufnummern

- Den Birth Alarm Lite auf den “Programmiermodus” einstellen (*siehe 7.1*) . Warten, bis das Statuslämpchen abwechselnd 1x blau - 1x grün blinkt.
- Nun rufen Sie über Ihr Telefon (vorzugsweise mit dem Handy) den Birth Alarm Lite an.
- Der Birth Alarm Lite empfängt Ihren Anruf und legt Ihre Nummer in seinem Speicher ab.









- Zur Bestätigung ruft der Birth Alarm Lite Sie zurück. Lassen Sie Ihr Telefon einfach klingeln (nehmen Sie also den Anruf nicht an und annullieren ihn auch nicht).

**i** Damit sind Sie schon mit dem Programmieren fertig. Der Birth Alarm Lite kennt Ihre Nummer und ruft Sie an, wenn die Geburt beginnt. Warten Sie 2-3 Minuten lang. Der Birth Alarm Lite verlässt den Programmiermodus automatisch. Danach ist der Birth Alarm Lite einsatzbereit.


Wenn Sie eine zweite Nummer einprogrammieren möchten, gehen Sie wie folgt vor.

- Warten Sie, bis der Birth Alarm Lite einmal blau und **zweimal** grün blinkt.
- Nun rufen Sie mit dem Gerät den Birth Alarm Lite an, auf dem Sie den **zweiten** Anruf erhalten möchten (dabei kann es sich auch um einen festen Telefonanschluss handeln).
- Der Birth Alarm Lite empfängt auch diesen Anruf und legt Ihre Nummer in seinem Speicher ab.
- Zur Bestätigung ruft der Birth Alarm Lite Sie auf diesem Gerät zurück. Lassen Sie das Telefon einfach klingeln und reagieren Sie nicht.

Abb. 2. : Leuchtsignale des Statuslämpchens beim Programmieren

Leuchtsignal LED	Bedeutung
  	Der Birth Alarm Lite ist für den ersten Anruf bereit
  	Der Birth Alarm Lite ist für den zweiten Anruf bereit




 *An der Anzahl grüner Blinkzeichen des Birth Alarm Lite ist zu erkennen, welche Nummer Sie programmieren können. 1x blau und 2x grün beispielsweise bedeutet, dass Sie die zweite Nummer programmieren.*

### 7.2.1 Programmieren mit “SMS”

Sie können den Birth Alarm Lite auch über ein SMS programmieren. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Erstellen Sie auf Ihr eigenes Mobiltelefon einen SMS-Bericht mit dem folgenden Text: **“M1:”** (Achtung! Großbuchstaben **M** verwenden) und geben Sie dann direkt die gewünschte erste Rufnummer ein. Die nachstehende Tabelle zeigt ein Beispiel für einen solchen SMS-Bericht in Ihrem Land.

Land	Land-code	Beispiel für eine Mobilnummer :	Beispiel für eine SMS: (Achtung! Großbuchstaben “M” verwenden und alles ohne Leerzeichen aneinander schreiben)
Niederlande (NL)	+31	0 6 12345678	<b>M1:+31612345678</b>
Belgien (BE)	+32	0 491 123456	<b>M1:+32491123456</b>
Frankreich (FR)	+33	0 6 12345678	<b>M1:+33612345678</b>
Schweiz (CH)	+41	0 176 12345678	<b>M1:+4117612345678</b>
Österreich (AT)	+43	0 664 1234567	<b>M1:+436641234567</b>
England (UK)	+44	0 7788 123456	<b>M1:+447788123456</b>
Schweden (SE)	+46	0 707 123456	<b>M1:+46707123456</b>
Deutschland (DE)	+49	0 171 1234567	<b>M1:+491711234567</b>


 *Wie in der Tabelle abzulesen ist, programmieren Sie somit den Ländercode anstelle der allerersten “0” ein, die Sie normalerweise eingeben, wenn Sie eine Mobilnummer anrufen.*





- 2 Den Birth Alarm Lite auf den “Programmiermodus” einstellen (*siehe 7.1*). Warten, bis das Statuslämpchen abwechselnd 1x blau - 1x grün blinkt.
- 3 Nun schicken Sie die SMS, die Sie gerade erstellt haben, an die Mobilnummer des Birth Alarm Lite.
- 4 Kurz darauf erhalten Sie zur Bestätigung eine Antwort-SMS vom Birth Alarm Lite. Darin steht die Nummer, die Sie hinter M1 einprogrammiert haben.

Natürlich können Sie in gleicher Weise auch die M2 programmieren. Sie können auch ruhig beide Nummern gleichzeitig mit einer einzigen SMS programmieren. In diesem Fall beginnen Sie allerdings bitte für jede Nummer eine neue Zeile in Ihrem SMS-Bericht.

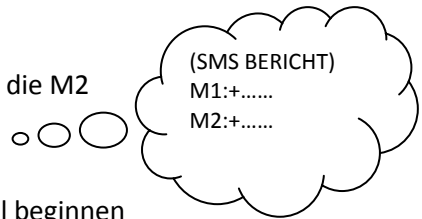

**i** *Es ist sehr zu empfehlen, als erste Nummer (M1) eine Mobilnummer einzuprogrammieren. Auf diese Weise kann der Birth Alarm Lite Ihnen SMS-Berichte schicken.*


**i** *Sie können die Nummern auch über SMS programmieren, wenn Sie den Geburtsmelder testen. (siehe § 8) Während das GSM-Lämpchen auf dem Birth Alarm Lite ruhig blinkt, können Sie eine SMS mit Rufnummern oder neuen Einstellungen schicken und der Birth Alarm Lite kann diese verarbeiten.*

## 7.2.2 Direktprogrammierung

Man kann den Birth Alarm Lite allerdings auch jederzeit programmieren, indem man die SIM-Karte des Birth Alarm Lite vorübergehend in Ihr eigenes oder ein anderes Mobiltelefon einbaut und die Nummern über dieses Telefon auf der SIM-Karte speichert. Das ist normalerweise

komplexer. Zum Direktprogrammieren der SIM-Karte geht man wie folgt vor:

- 1 Die SIM-Karte aus dem SIM-Kartenhalter des Birth Alarm Lite nehmen.  
*(siehe 5.3)*
- 2 Die SIM-Karte in ein anderes Mobiltelefon einbauen.
- 3 Das Mobiltelefon einschalten.
- 4 Die Namen M1,M2 **auf der SIM-Karte** (Speicherplätze 11 und 12) einprogrammieren. Wie man dabei vorgeht, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung für das Mobiltelefon. Hierbei ist darauf zu achten, dass Sie die Nummern nicht versehentlich auf dem Festspeicher des Telefons ablegen.
- 5 Alle Nummern auf der SIM-Karte einprogrammieren (auch wenn Sie beispielsweise nur zwei Nummern verwenden möchten). Wenn Sie möchten, dass einer der Speicherplätze nicht angerufen wird, dann programmieren Sie die folgende Rufnummer ein: "+1111".

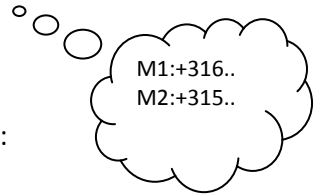



## 8 Tests

Vor der Nutzung des Birth Alarm Lite ist es wichtig, zunächst einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass er ordentlich funktioniert. Diesen Test können Sie ganz einfach selbst vornehmen.




- Gehen Sie mit dem Birth Alarm Lite vorzugsweise dorthin, wo sich Ihre Stute befindet.
- Nehmen Sie den Birth Alarm Lite in die Hand und schalten Sie ihn ein, so dass das Statuslämpchen einmal alle 8 Sekunden grün aufleuchtet.
- Danach drehen Sie den Birth Alarm Lite um 90 Grad, so dass das Statuslämpchen nach oben weist.
- Daraufhin blinkt das Statuslämpchen schneller und springt auf orange um.
- Nach einigen Sekunden wechselt das Statuslämpchen auf blau und auch das GSM-LED leuchtet auf.
- Kurz darauf ruft der Birth Alarm Lite die Nummer an, die unter "M1" einprogrammiert ist.
- Sie nehmen den Anruf nicht an und verweigern ihn aber auch nicht durch Betätigung der roten Taste. Sie lassen das Telefon ganz einfach klingeln.
- Nach einigen Sekunden hört der Birth Alarm Lite von selbst auf.




- Jetzt können Sie den Birth Alarm Lite stoppen, indem Sie ihn ganz einfach anrufen. Der Birth Alarm Lite nimmt Ihren Anruf entgegen und Sie hören drei Töne als Zeichen dafür, dass Sie den Birth Alarm Lite gestoppt haben. Der Birth Alarm Lite ruft daraufhin keine weiteren Nummern an, bis er nach einigen Minuten erneut um 90° gedreht wird.

Wenn der Test gut verlaufen ist, können Sie den Birth Alarm Lite an Ihrer Stute befestigen.

*Sollten trotzdem Probleme auftreten, können Sie den mitgelieferten Problemlöser "List für das Troubleshooting" verwenden.*

 *Sie können die Mobilnummer des Birth Alarm Lite unter der Bezeichnung "Stute" oder "Geburt" in Ihr eigenes Handy einprogrammieren. Auf diese Weise können Sie auf dem Display Ihres Mobiltelefons bereits erkennen, wann der Birth Alarm Lite Sie anruft.*

 *Wenn Sie vom Birth Alarm Lite angerufen werden (ob es sich nun um eine Geburtsmeldung handelt oder beim Programmieren), nehmen Sie den Anruf des Birth Alarm Lite keinesfalls entgegen. Wenn Sie das Telefonat nämlich annehmen, führen Sie im Prinzip "ein Gespräch" mit dem Birth Alarm Lite und das wird unnötig von Ihrem Guthaben abgezogen! Eingehende Anrufe also auch nicht annullieren (Betätigung der roten Taste), denn das kann zur Folge haben, dass der Birth Alarm Lite an Ihre Voicemail durchgestellt wird.*

## 9 Befestigung an der Stute

Um den Birth Alarm Lite an einem Gurt oder unter dem Halfter verwenden zu können, muss dieser an dem mitgelieferten Halter befestigt werden. Dabei geht man wie folgt vor:

- 1 Schieben Sie den Birth Alarm Lite vorsichtig in den Halter ein, so wie es im nachstehenden Foto abgebildet ist.
- 2 Achten Sie darauf, dass die beiden seitlichen Lämpchen sichtbar sind.
- 3 Danach die Klappe mit der mitgelieferten Verschlussklemme schließen.



## 9.1 Befestigung unter dem Halfter

Wenn Sie den Birth Alarm Lite unter einem Halfter befestigen möchten, so befestigen Sie ihn gemäß der nachstehenden Vorschrift mit drei Kabelbindern.



## 9.2 Befestigung an einem Antirollgurt

Wenn Sie den Birth Alarm Lite an einem Antirollgurt befestigen, montieren Sie den Halter mit dem Birth Alarm Lite gemäß der nachstehenden Abbildung. Zur Befestigung an einem Antirollgurt benötigen Sie 6 Kabelbinder.





## 10 Zusammenfassung und Nutzung

*Nachstehend folgt eine Kurzbeschreibung der Funktionsweise des Birth Alarm Lite und des Umgangs mit dem Gerät. Es ist zu empfehlen, diesen Text zu lesen.*

Der Birth Alarm Lite überprüft die Körperhaltung Ihrer Stute alle 8 Sekunden. Zwischendurch schaltet der Birth Alarm Lite auf einen Energiesparmodus um, damit die Batterie nicht unnötig leerläuft. Wenn bei Ihrer Stute die Wehen einsetzen und sie sich hinlegt und ausstreckt, ruft der Birth Alarm Lite Ihr eigenes Mobiltelefon an. Daraufhin erscheint die Rufnummer des Birth Alarm Lite auf dem Display Ihres Mobiltelefons. Wenn Sie diese Nummer im Telefonverzeichnis Ihres Mobiltelefons speichern, beispielsweise unter dem Namen "BirthAlarm" oder "Stute", so erscheint dieser Name auch im Display Ihres Telefons. So wissen Sie also, dass der Birth Alarm Lite Sie anruft. Im Gegensatz zu Ihrer normalen Reaktion nehmen Sie in diesem Fall **nicht** auf! Auf diese Weise führen Sie kein "Gespräch" und die Meldung an Sie erfolgt kostenlos. Nach einigen Sekunden stoppt der Birth Alarm Lite von selbst mit dem Anruf. Danach können Sie den Birth Alarm Lite zurückrufen (auch das ist kostenlos). Damit teilen Sie dem Birth Alarm Lite mit, dass Sie seinen Anruf gehört haben. Daraufhin stoppt der Birth Alarm Lite mit dem Klingeln. Der Birth Alarm Lite wird erst dann wieder aktiv, wenn sich das Pferd erneut hinlegt.

Wenn Sie den Birth Alarm Lite nicht innerhalb gut einer Minute zurückrufen, so ruft der Birth Alarm Lite die zweite Nummer im Speicher an (sofern eine solche Zweitnummer einprogrammiert worden ist). Danach wartet er wiederum gut eine Minute auf eine Bestätigung. Wenn der Birth Alarm Lite die beiden Nummern je einmal angerufen hat, ohne jedoch eine Reaktion zu erhalten, ruft der Birth Alarm Lite erneut die erste Nummer an und danach nochmals die zweite Nummer. Danach hört der Birth Alarm Lite von selbst mit dem Anrufen auf.





In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Birth Alarm Lite auch problemlos eine Festnetznummer (Ihr Haustelefon) anwählen kann. Wenn Ihr Festnetzgerät eine Nummernerkennung besitzt, können Sie auch vorab feststellen, ob der Birth Alarm Lite Sie anruft. Wenn Ihr Festnetzgerät keine Rufnummernerkennung besitzt, müssen Sie alle Anrufe entgegennehmen. Dann hören Sie einen Piepton, an dem Sie den Birth Alarm Lite erkennen. In diesem Fall kommt eine Gesprächsverbindung mit dem Birth Alarm Lite zustande und es wird ein geringer Betrag von der Prepaid-Karte des Birth Alarm Lite abgebogen. Wenn Sie den Birth Alarm Lite in dieser Weise verwenden möchten, so empfehlen wir Ihnen, das Telefonguthaben regelmäßig zu überprüfen. Achten Sie darauf, dass es immer mindestens 10,00 Euro beträgt.

Mit einem Satz Alkali-Batterien kann das System normalerweise mindestens einen Monat lang funktionieren. Von der Nutzung aufladbarer Batterien oder der billigeren Zink-Kohle-Batterien ist stark abzuraten!





## 11 Technische Daten

Netzspannung	4,5V (3xAA Alkali-Batterien)
Stromverbrauch	130uA im Durchschnitt (1,3A Spitzenverbrauch)
GSM-Modul	Dualband GSM-900/1800 MHZ
Speicher	2
Sleep-Modus	Nein
Erkennungswinkel	Nicht einstellbar
Arten von Meldungen	Anruf / SMS

**Garantie:** 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Gilt nicht bei Bruch, Wasserschäden und / oder anderen Beschädigungen. Der Hersteller und Importeur übernehmen keinerlei Haftung für Schäden welcher Art auch immer, die auf die Nutzung des Birth Alarm Lite zurückzuführen sind. Die Lieferung und alle Arbeiten erfolgen gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Gallagher Europe B.V.

Gallagher Europe B.V. (NL) Bornholmstraat 62A 9723 AZ GRONINGEN Tel. 0031 (0)50 368 31 00 / Fax 0031 (0)50 306 16 55 E-mail: <a href="mailto:info.nl@gallaghereurope.com">info.nl@gallaghereurope.com</a>	
Gallagher Belgium b.v.b.a. (BE) Oude Baan 14 3945 HAM Tel. 013/66 77 66 / Fax 013/ 66 80 21 E-mail: <a href="mailto:info.be@gallaghereurope.com">info.be@gallaghereurope.com</a>	
Gallagher Europe (DE) Talstrasse 7 49479 Ibbenbüren Telefon: 05451/9444-0 / Fax: 05451/9444-33 E-mail: <a href="mailto:info.de@gallaghereurope.com">info.de@gallaghereurope.com</a>	



<p>Gallagher Europe (FR) Miniparc du Verger Bâtiment C - 1 rue de Terre Neuve 91940 LES ULIS Tél. 0820 203 700 / Fax 0820 203 701 E-mail: <a href="mailto:info.fr@gallaghereurope.com">info.fr@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Europe (AT) Hopfgarten 18 8741 Weisskirchen Tel. +43 (0)3577/82200 / Fax. +43 (0)3577/80921 E-mail: <a href="mailto:info.at@gallaghereurope.com">info.at@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Schweiz AG (CH) Zürcherstrasse 499 9015 St. Gallen Tel. 071 / 313 29 50 / Fax. 071 / 313 29 60 E-mail: <a href="mailto:info@gallagherschweiz.ch">info@gallagherschweiz.ch</a></p>	
<p>Gallagher Powerfence UK Ltd. Curriers Close, Canley COVENTRY CV4 8AW Tel. 0844 8500101 / Fax 0844 8501545 E-mail: <a href="mailto:info.uk@gallaghereurope.com">info.uk@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Sweden AB (SE) Rönnaviksgatan 13 213 74 MALMÖ Tel. 040-41 88 80 / Fax 040-41 88 88 E-post: <a href="mailto:info@gallagher.se">info@gallagher.se</a></p>	



Gallagher Europe B.V.  
Bornholmstraat 62A  
9723 AZ Groningen

See for local addresses:

[www.birthalarm.com](http://www.birthalarm.com)