

**((( BIRTH  
ALARM )))**

*the original product*

# **Birth Alarm Premium**

**SE** Bruksanvisning





Tack för att du har köpt Birth Alarm Premium. Detta är ett mycket pålitligt övervakningssystem för fölande ston. Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning noggrant innan systemet tas i bruk. Systemet måste monteras och manövreras på rätt sätt för att det ska fungera.

## Innehåll

1.	Inledning.....	4
2.	Förpackningens innehåll .....	4
3.	Inför användning .....	5
3.1	Första gången .....	5
3.2	Sätta på/stänga av.....	6
4	Inuti Birth Alarm Premium .....	7
4.1	Sätta i eller byta batterier .....	7
4.2	Birth Alarm Premiums kåpa .....	8
4.3	Sätta in simkortet .....	9
5	Lamporna (dioder) på Birth Alarm Premium .....	10
5.1	Statuslamporna .....	10
5.2	LTE-lamporna .....	11
6	Installation av nytt simkort .....	12
6.1	Val av simkort.....	12
6.2	Förbereda simkortet (allmänt).....	12
6.2.1	Kontantkort och samtalspott .....	12
6.2.2	Abonnemang eller internet-/datakort .....	12
6.3	Att färdigställa simkortet. ....	13
7	Programmera telefonnummer .....	14
7.1	Programmeringsläge .....	14
7.2	Programmera telefonnummer.....	14
7.2.1	Programmera genom att ringa.....	14
7.2.2	Programmera med sms .....	15
7.2.3	Direktprogrammering .....	16
8.	Programmering av övriga inställningar .....	17
8.1	Sovläge .....	17
8.2	Inställning av vinkeln.....	17
8.3	Antal uppringningar och tidpunkt för sms .....	18
8.3.1	Ändra antalet gånger enheten ringer numren i listan .....	18
8.3.2	Ställa in tidpunkt för sms .....	18
8.4	Återställa till standardinställningar .....	19
9.	Status-sms .....	20
10.	Tester.....	21
11	Montering på stoet .....	22
11.1	Montering under grimman .....	23
11.2	Montering i en anti-rullgjord.....	23
12	Sammanfattning och användningsätt .....	24
13	Tekniska data.....	25

## 1. Inledning

När stoet ska föla vill du gärna vara på plats så att du kan hjälpa till om det uppstår komplikationer, eller ringa veterinär vid behov. Hästar och ponnyer brukar lägga sig utsträckta på sidan när de ska föla. Då får de mer plats när krystvärkarna kommer. Birth Alarm Premium utnyttjar detta beteende och registrerar det. Birth Alarm Premium är enkel att montera under stoets grimma (eller på en anti-rulljord) och den kommer då att varna när förlossningen börjar.

## 2. Förpackningens innehåll

1. **Birth Alarm Premium fölningslarm.**
2. **Den särskilda hållaren** (i vilken Birth Alarm Premium skjuts in). Hållaren kan fästas under stoets grimma eller i ringen på anti-rulljorden.
3. **Buntband.** För att du ska kunna använda enheten med en gång innehåller väskan några buntband. Dessa buntband går bara att använda en gång, men de säljs exempelvis på vanliga byggmarknader.
4. **Specialskruvmejseln.** Den kan du använda för att öppna Birth Alarm Premium (exempelvis för att byta batterier eller om du ska sätta i eller ta ut simkortet). I skruvmejselns bakre ände finns också en stark magnet. Den kan du använda för att manövrera Birth Alarm Premium.
5. **Usb-kabel.** Denna kabel (eller en liknande) krävs för att uppdatera systemets programvara.
6. **Adapterset för simkort.** Det här setet innehåller några hållare med vilka du kan anpassa simkortsformatet. Du kanske inte behöver dessa, men de kan komma till pass om du vill sätta simkortet i din egen telefon och telefonens simkortsplats har ett annat format.
7. **Dokumentation.** Birth Alarm Premium levereras med två typer av dokumentation. Nämligen:
  - a. **Kortfattad bruksanvisning**
  - b. **Felsökning** (Denna kontrollista kan du använda om det uppstår problem när du använder Birth Alarm Premium)



### 3. Inför användning

#### 3.1 Första gången

När du ska använda Birth Alarm Premium första gången ska du följa dessa instruktioner (det är endast nödvändigt en gång):

- Skruva upp Birth Alarm Premium och ta ut den röda remsan som sitter mellan ett av batterierna och batterikontakten. Nu har batterierna kontakt med Birth Alarm Premium.
- Sätt i simkortet. Det följer inte med i paketet och det måste du skaffa själv. Det säljs i vanliga telefonbutiker. Du kan också köpa simkort i de flesta livsmedelsbutiker.
- I kapitlet "Installera nytt simkort" (**se 6**) kan du läsa hur du ställer in och sätter i ett nytt simkort.
- När du har utfört dessa steg på Birth Alarm Premium kan du skruva ihop enheten igen och gå vidare med inställningarna. Tänk på att ljusledarna ska vara placerade vanför statuslamporna när du skruvar fast (**se 4.2**)



Öppna med



Ta bort remsan



*Om din mobiltelefon har bra täckning i stallet eller på ängen där stoet är rekommenderar vi att du väljer ett simkort från samma leverantör.*



*Det kan vara så att det finns särskild lagstiftning i ditt land med hänsyn till användning av simkort i automatiska mobila system (M2M). Fråga mobiloperatören eller i telefonbutiken om det är fallet.*

### 3.2 Sätta på/stänga av

Du kan sätta på och stänga av, samt manövrera Birth Alarm Premium med den bakre änden av specialskruvmejseln som följer med enheten. På en av dosans långsidor finns två statuslampor.

Gör på följande sätt för att sätta **PÅ** Birth Alarm Premium:

- Placera specialskruvmejselns bakre ände mot en av statuslamporna. (Vilken av dem spelar ingen roll.)
- Birth Alarm Premium ska nu starta. När enheten startar blir båda statuslamporna gröna.
- Då kan du ta bort specialskruvmejseln igen.
- Nu är Birth Alarm Premium påslagen. Statuslamporna blinkar grönt ett kort ögonblick ungefär var femte sekund för att visa att Birth Alarm Premium är påslagen och att den är i drift.



Gör så här för att stänga **AV** Birth Alarm Premium igen:


- Placera återigen specialskruvmejselns bakre ände mot en av statuslamporna. (Vilken av dem spelar ingen roll.)
- Efter en kort stund kommer lamporna att lysa rött och sedan stängs Birth Alarm Premium av.



## 4 Inuti Birth Alarm Premium

Nedan ges en översikt över de systemkomponenter du behöver för att kunna manövrera och använda systemet.

1. Batterier.
2. De två statuslamporna
3. Simkortsplats
4. Usb-anslutning (för uppdatering av program)
5. LTE-statusdioder
  - 5.1 "NET" – diod
  - 5.2 "RING" – diod
  - 5.3 "LTE" – diod

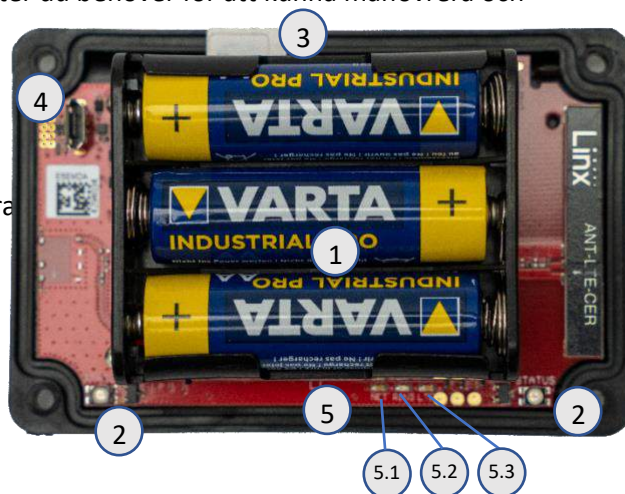

### 4.1 Sätta i eller byta batterier

När du byter batterier i Birth Alarm Premium ska du alltid använda alkaliska batterier (helst av märkena Duracell, Panasonic eller Varta). Vi avråder ifrån att använda uppladdningsbara batterier. Dessutom ska du byta de tre batterierna samtidigt. Om du inte kan få ut batterierna med fingrarna kan du försiktigt peta ut dem med en liten skruvmejsel. Batterierna ska alltid placeras med minuspolen mot fjädern.



*Använd alltid nya batterier i början av följningsäsongen!*




*Om du inte ska använda Birth Alarm Premium under en längre period, exempelvis när följningsäsongen är över, ska batterierna tas ut. Om de sitter kvar kan de börja läcka och orsaka skador i Birth Alarm Premium.*




## 4.2 Birth Alarm Premiums kåpa

Kåpan på Birth Alarm Premium kan bara skruvas ihop på ett enda sätt. Ljusledarna på långsidan av locket ska sitta ovanför statuslamporna när locket skruvas fast.

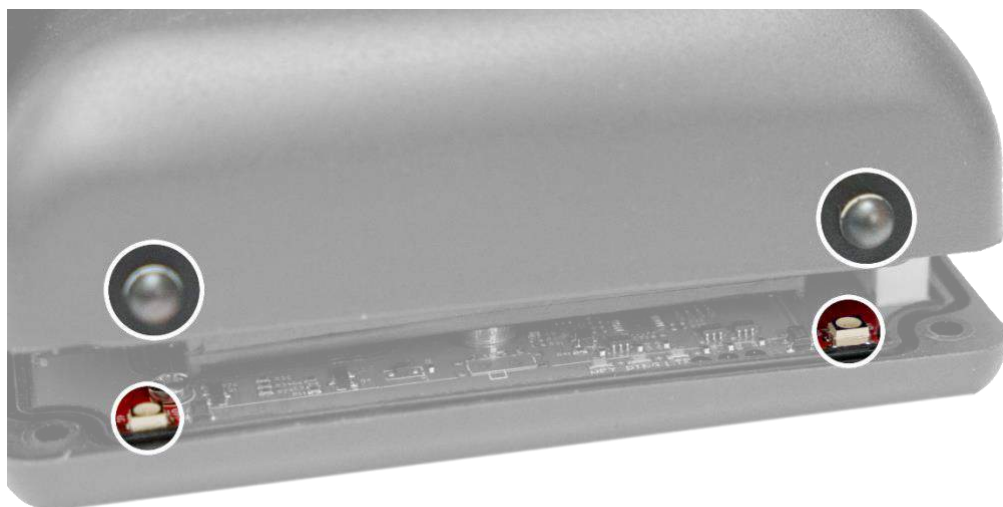

### 4.3 Sätta in simkortet


Birth Alarm Premium använder ett mikrosimkort. Moderna simkort levereras i ett perforerat kort ur vilket du kan klicka ur mikrosimformatet. Tänk på att mikrosimformatet vanligtvis är den näst minsta storleken. (12 × 15 mm).

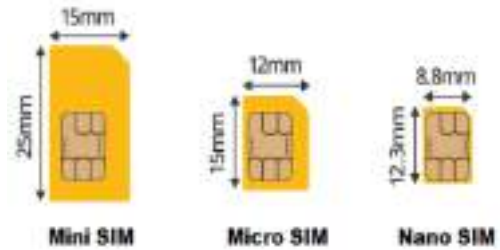

Simkortet ska skjutas in i Birth Alarm med chippet vänt nedåt. Tänk också på den avfasade kanten på simkortet. Den ska vara vänd framåt när du sätter in simkortet.

Skjut in simkortet i simkortsplatsen tills det hörs ett "klick". Släpp sedan simkortet igen. Simkortet sitter nu i simkortsplatsen och Birth Alarm Premium är färdig att tas i bruk. När du tar ut simkortet ur simkortsplatsen ska du trycka in simkortet försiktigt tills det hörs ett "klick". När du släpper simkortet igen hoppar det ut lite grann så att det är enkelt att dra ut.

*(För mer information om simkortet, se kapitel 6)*

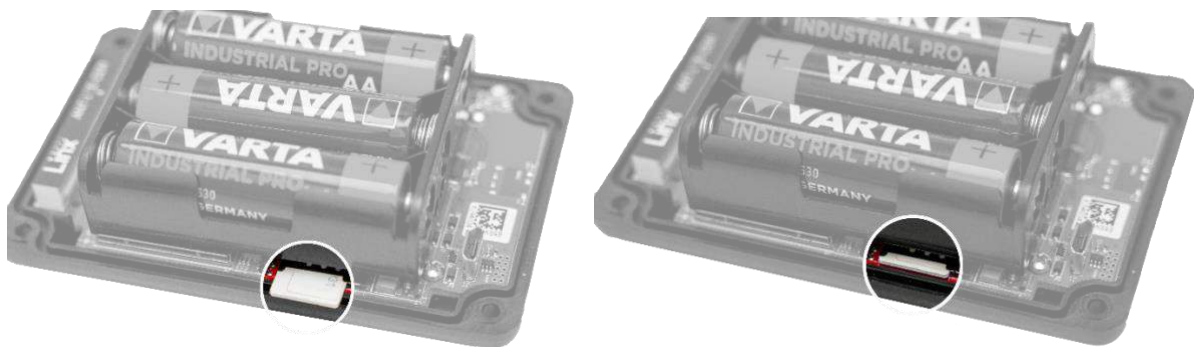

## 5 Lamporna (dioder) på Birth Alarm Premium

Det finns två statuslampor på Birth Alarm Premium med vilka du kan kontrollera enhetens status och dessutom finns det tre små lampor inuti enheten som bara avser den interna LTE-modulen.

### 5.1 Statuslamporna

Statuslamporna sitter på dosans långsidor. De två lamporna fungerar på exakt samma sätt. Anledningen till att det är två lampor är för att du ska kunna läsa av statusen både på höger och vänster sida av stoet.



I tabellen nedan visas de färgkoder som Birth Alarm Premium kan ge.

Färgkod	Förklaring
● ●	● Standby, batteri OK
●● ●●	●● Standby, batteri OK, sovläge aktiverat
● ●	● Standby, låg batteriladdning
● ●	● LTE/GSM aktiv, ansluter
●● ●●	●● LTE/GSM aktiv, otillräcklig täckning
●● ●●	●● LTE/GSM aktiv, medelgod täckning
●● ●●	●● LTE/GSM aktiv, god täckning

## 5.2 LTE-lamporna

LTE-lamporna syns inte förrän du öppnat Birth Alarm Premium. I vanliga fall behöver du inte läsa av dessa lampor men de kan ge ledning om det är problem med mobiluppkopplingen och du kontaktar kundservice för att lösa detta.



Tabellen nedan beskriver de olika blinkningsmönstren och vad de betyder:

Namn	Mönster	Förklaring
NET		Modulen ansluter till nätverket
NET		Modulen är ansluten till nätverket
NET		Modulen ringer
RING		Modulen blir uppringd
LTE		Modulen är påslagen

## 6 Installation av nytt simkort

Simkortet är inte en del av vårt produktpaket. Det måste du skaffa själv.

### 6.1 Val av simkort

Köp ett kontantkort eller ett simkort med ett billigt data + samtalsabonnemang i en telefonbutik. Välj helst en operatör som du vet har bra täckning på den plats där du vill använda Birth Alarm Premium. Ett kontantkort är i regel enklast och smidigast. Men det kan vara så att det är förbjudet i ditt land att använda av simkort med vanliga telefonnummer i automatiska mobila system (M2M). Kontrollera om så är fallet.



*I Nederländerna är det exempelvis inte tillåtet att använda ett kontantkort med ett vanligt mobilnummer i ett automatiskt uppringningssystem. Kontakta din telefonleverantör för att teckna ett lämpligt abonnemang eller läs på [www.birthalarm.com](http://www.birthalarm.com) för information om lämpliga simkortslösningar.*

### 6.2 Förbereda simkortet (allmänt)

När du har skaffat ett simkort måste du aktivera det. Det gör du på följande sätt:

- Sätt det nya simkortet i din telefon.
- Om telefonen begär en pinkod när du startar den, anger du den. Pinkoden står i broschyren eller i brevet som följde med simkortet. Pinkoden är vanligtvis "0000". **Det är viktigt att du stänger av simkortets pinkodsskydd. Telefonen får inte begära en pinkod när du startar den med simkortet. Läs i bruksanvisningen för telefonen hur detta går till.**

#### 6.2.1 Kontantkort och samtalspott

Om du använder ett kontantkort är det viktigt att då och då kontrollera att samtalspotten inte är slut. Vid normalt bruk är samtals- och sms-kostnaderna för Birth Alarm Premium minimala, men vi rekommenderar ändå att kontrollera saldot på kontantkortet. Det gör du genom att sätta simkortet i telefonen och ringa eller messa till mobiloperatörens saldotjänst. Se till att det finns minst 100 kronor på kortet och att samtalspotten fortsätter att gälla. Om samtalspotten är på väg att ta slut ska du fylla på kontantkortet (påfyllningskoder säljs i livsmedelsbutiker, bensinstationer med mera) eller på operatörens webbplats.

#### 6.2.2 Abonnemang eller internet-/datakort

Om du använder ett abonnemangskort/datakort ska du se till att operatören aktiverar samtals- och smsfunktionen på kortet. Datakort har i regel inte detta aktiverat.

### 6.3 Att färdigställa simkortet.

När du har aktiverat simkortet ska du göra följande:

- Ring till någon minst en gång. Det kan hända att operatören spelar upp ett välkomstmeddelande, vänta tills det är slut och tills du hör att det ringer i den mottagande enheten.
- Nu ska du kontrollera att simkortets röstbrevlåda är avstängd. Det gör du genom att ringa till simkortets nummer från en annan telefon. Om du (efter en liten stund) kopplas till röstbrevlådan är alltså simkortets röstbrevlåda aktiverad. Då ska du avaktivera röstbrevlådan.
- I regel kan du stänga av röstbrevlådan genom att ringa till operatörens kundservice eller genom att knappa in och ringa och knappa in en särskild avstängningskod. Hur du avaktiverar röstbrevlådan skiljer sig från operatör till operatör. Du kan läsa mer om detta i bruksanvisningen till ditt simkort.
- Nu tar du ut simkortet ur telefonen och sätter det i Birth Alarm Premium (se 4.3)



*Programmera aldrig in simkortets eget nummer på plats M1 eller på någon av de andra minnesplatserna på simkortet!*

## 7 Programmera telefonnummer

### 7.1 Programmeringsläge

Gör på följande sätt för att programmera Birth Alarm Premium direkt:

Håll den bakre änden av skruvmejseln **några sekunder** mot en av statuslamporna på dosans långsida. När du gör detta ska statuslamporna först blinka grönt tre gånger och sedan lysa blått. När statusdioden lyser blått kan du ta bort skruvmejseln. Birth Alarm Premium är nu i programmeringsläge.

### 7.2 Programmera telefonnummer

Telefonnumren kan programmeras på tre olika sätt. Antingen genom att ringa eller skicka ett sms från dem, eller genom att programmera dem direkt. Alla möjligheter beskrivs utförligt nedan. **Men det räcker med att göra det på ett sätt.** Det vanligaste sättet är att ringa till enheten. De fyra nummer som Birth Alarm Premium kan ringa till kallas "M1", "M2", "M3" och "M4".

#### 7.2.1 Programmera genom att ringa

- Se till att Birth Alarm Premium är i "Programmeringsläge" (**se 7.1**). Vänta till dess att statuslampan blinkar en gång blått, en gång grönt.
- Nu ringer du med din (helst mobil-) telefon till Birth Alarm Premium.
- Birth Alarm Premium svarar när du ringer och programmerar in telefonnumret i minnet.
- Birth Alarm Premium ringer också tillbaka för att bekräfta numret. Då låter du bara telefonen ringa (du ska alltså inte svara eller trycka bort samtalet).



*Det är egentligen det enda som krävs för att programmera. Birth Alarm Premium känner nu till ditt nummer och ringer till dig när fölningen startar. Vänta 2–3 minuter. Birth Alarm Premium avslutar programmeringsläget automatiskt och är klar att tas i bruk.*



*När du är färdig med programmeringen väntar du i 2–3 minuter. Birth Alarm Premium avslutar programmeringsläget automatiskt och återgår till normalt läge. Birth Alarm Premium är då på och är färdig att användas. Du kan lämna programmeringsläget omedelbart genom att återigen hålla den bakre änden av skruvmejseln mot någon av statuslamporna.*

Om du vill programmera fler nummer kan du följa anvisningarna nedan.

- Vänta till dess att Birth Alarm Premium blinkar en gång blått, **två gånger** grönt.
- Ring nu till Birth Alarm Premium från den telefon som du vill bli uppringd på som nummer **2** (det kan också vara en fast telefon).
- Birth Alarm Premium svarar även denna gång och programmerar in telefonnumret i minnet.
- Och även denna gång ringer Birth Alarm Premium tillbaka för att bekräfta numret. Låt telefonen ringa och svara inte.

- Efter några sekunder kommer Birth Alarm Premium blinka en gång blått och **tre** gånger grönt för att visa att du nu kan programmera det  **tredje** numret på samma sätt (och sedan även det fjärde numret).

Ljusbild statusdiod	Förklaring
	Modulen är färdig för den första uppringningen
	Modulen är färdig för den andra uppringningen
	Modulen är färdig för den tredje uppringningen
	Modulen är färdig för den fjärde uppringningen

- Du kan avläsa vilket nummer du kan programmera genom att räkna hur många gånger lamporna blinkar grönt. Om enheten exempelvis blinkar blått en gång och grönt **fyra** gånger programmerar du det **fjärde** numret

### 7.2.2 Programmera med sms

Birth Alarm Premium kan också programmeras via sms. Då gör du så här:

Skriv ett sms på telefonen med följande innehåll: "M1:" (Obs! Det ska vara **M** med stor bokstav) direkt följt av det nummer som ska programmeras. Tabellen visar med ett exempel hur sms-meddelandet ska vara utformat i ditt land.

Land	Landskod	Om ditt mobilnummer är:	Då ska sms-meddelandet se ut så här:
Nederländerna (NL)	+31	0 6 12345678	M1:+31612345678
Belgien (BE)	+32	0 491 123456	M1:+32491123456
Frankrike (FR)	+33	0 6 12345678	M1:+33612345678
Schweiz (CH)	+41	0 176 12345678	M1:+4117612345678
Österrike (AT)	+43	0 664 1234567	M1:+436641234567
England (UK)	+44	0 7788 123456	M1:+447788123456
Sverige (SE)	+46	070 712 34 56	M1:+46707123456
Tyskland (DE)	+49	0 171 1234567	M1:+491711234567

Obs! Använd versalt "M" och använd inga mellanslag)



Som du kan se i tabellen programmerar du alltså landskoden i stället för den första siffran "0" som du brukar knappa in när du ringer ett mobilnummer.

- Se till att Birth Alarm Premium är i "Programmeringsläge" (**se 7.1**). Vänta till dess att statuslampan blinkar en gång blått, en gång grönt.
- Nu skickar du det sms som du skrivit till Birth Alarm Premiums mobilnummer.
- Efter en liten stund får du ett status-sms från Birth Alarm Premium som en bekräftelse. Där står det nummer du programmerat in på position M1:



- Naturligtvis kan du också programmera numren till position M2, M3 och M4 på samma sätt. Du kan också programmera flera nummer samtidigt i ett och samma sms, men då är det viktigt att varje nummer står på en egen rad i sms-meddelandet.





Om du vill ta bort ett nummer via sms skickar du ett meddelande som bara består av den aktuella minnesplatsen, utan att ange ett telefonnummer.



Vi rekommenderar bestämt att programmera in ett mobilnummer på den första minnesplatsen (M1). Då kan Birth Alarm Premium skicka sms till dig och ta emot sms från dig.



Du kan också programmera numren via sms när du testar följningslarmet. **(se 10)** När NET-lampan på Birth Alarm Premium blinkar långsamt (lyser grönt länge och sedan ett kort avbrott) kan du skicka ett sms med telefonnummer eller nya inställningar som Birth Alarm Premium bearbetar.

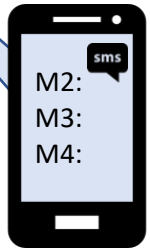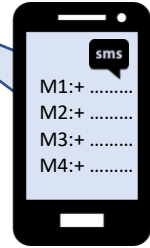


### 7.2.3 Direktprogrammering

Du kan alltid programmera Birth Alarm Premium genom att tillfälligt sätta simkortet från Birth Alarm Premium i din eller en annan mobiltelefon och sedan programmera numren på simkortet med hjälp av telefonen. Men det är oftast krångligare. Gör på följande sätt för att programmera simkortet direkt:

- Sätt simkortet i en annan mobiltelefon.
- Sätt på mobiltelefonen.



Om det inte går att programmera numren på simkortets minnesplatser 11, 12, 13 och 14 med mobiltelefonen kan du också sätta simkortet i Birth Alarm Premium och aktivera programmeringsläget. Birth Alarm Premium märker då att simkortet inte är konfigurerat och kommer att programmera numren på rätt minnesplatser på simkortet inför användning.

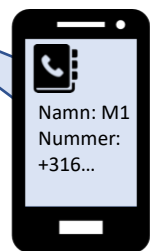

## 8. Programmering av övriga inställningar

Birth Alarm Premium levereras med standardinställningar. De fungerar i regel bra för de flesta ston (hästar/ponnyer). Men du kan ändra dessa standardinställningar om så önskas.

### 8.1 Sovläge

Använd Birth Alarm Premiums "sovläge" om det högrädriga stoet lägger sig ner utsträckt för att vila (sover). Sovläget är en särskild anpassning av Birth Alarm Premiums funktion. Tack vare denna anpassning förhindras att enheten skickar ett meddelande om stoet bara ligger utsträckt. Om du använder sovläget kommer Birth Alarm Premium att kontrollera om stoet ligger ner utsträckt och samtidigt visar tecken på oro, vilket är fallet vid krystvärkar. Sovläget kan **aktiveras** på följande sätt:

- Skriv ett sms på telefonen med följande innehåll: "**SL:1**" (Obs! Skriv **SL** med stora bokstäver)
- Se till att Birth Alarm Premium är i "Programmeringsläge" (**se 7.1**). Vänta till dess att statuslampan blinkar en gång blått, en gång grönt.
- Nu skickar du det sms som du skrivit till Birth Alarm Premiums mobilnummer.
- Efter en liten stund får du ett status-sms från Birth Alarm Premium som en bekräftelse. Där står på den sista raden "SL:1", vilket anger att sovläget är aktiverat.

Du kan också **stänga av** sovläget. Det sker på följande sätt:

- Skriv ett sms på telefonen med följande innehåll: "**SL:0**" (Obs! Skriv **SL** med stora bokstäver)
- Se till att Birth Alarm Premium är i "Programmeringsläge" (**se 7.1**). Vänta till dess att statuslampan blinkar en gång blått, en gång grönt.
- Nu skickar du det sms som du skrivit till Birth Alarm Premiums mobilnummer.
- Efter en liten stund får du ett status-sms från Birth Alarm Premium som en bekräftelse. Där står på den sista raden "SL:0", vilket anger att sovläget är avstängt. Birth Alarm Premium fungerar då på normalt sätt igen.

### 8.2 Inställning av vinkeln

Birth Alarm Premium reagerar när stoet lägger sig ner och sträcker ut sig. Enheten "mäter" med andra ord i vilken vinkel hon lägger sig på sidan. I genomsnitt betraktar Birth Alarm Premium en vinkel som är större än 65° som "onormal". Då aktiveras enheten. Birth Alarm Premium har standardinställningen 65°. Men du kan höja denna gräns från 65° så att Birth Alarm Premium aktiveras senare, det vill säga blir mindre känslig. Gör på följande sätt för att ändra inställningen av vinkeln (exempelvis till 70°):

- Skriv ett sms på telefonen med följande innehåll: "**AN:70**" (Obs! Skriv **A** med stora bokstäver)
- Se till att Birth Alarm Premium är i "Programmeringsläge" (**se 7.1**). Vänta till dess att statuslampan blinkar en gång blått, en gång grönt.
- Nu skickar du det sms som du skrivit till Birth Alarm Premiums mobilnummer.

- Efter en liten stund får du ett status-sms från Birth Alarm Premium som en bekräftelse. Där står på den nästnäst sista raden "AN:70", vilket anger att Birth Alarm Premium nu aktiveras vid en liggvinkel på 70°.

Du kan ställa in vinkeln mellan 60° och 75°.



*Om du exempelvis alltid får ett larm med ett sms där statusmeddelandet anger att stoet ligger i 65°, trots att allt är som det ska, då kan du justera aktiveringsvinkeln för detta sto en aning till exempelvis 70°. Men gå inte längre än 75°!*

### 8.3 Antal uppringningar och tidpunkt för sms

Du kan ställa in hur många gånger Birth Alarm Premium ringer dig och när den skickar ett sms till dig. Enligt standardinställningen ringer Birth Alarm Premium alla nummer i listan två gånger. Den ringer med andra ord i tur och ordning nummer M1, M2, M3 och M4 som är programmerade och sedan ringer den alla nummer en gång till. Efter det slutar Birth Alarm Premium att ringa automatiskt. När Birth Alarm Premium ringt nummer M1 för andra gången kommer den att skicka ett status-sms till M1. Om du vill att Birth Alarm Premium ringer fler gånger, eller om du vill att den skickar sms-meddelandet tidigare eller senare kan du ändra det själv.

#### 8.3.1 Ändra antalet gånger enheten ringer numren i listan

Gör på följande sätt för att ändra hur många gånger enheten ringer igenom listan (exempelvis fem gånger):

- Skriv ett sms på telefonen med följande innehåll: "**CL:5**" (Obs! Skriv **CL** med stora bokstäver)
- Se till att Birth Alarm Premium är i "Programmeringsläge" (**se 7.1**). Vänta till dess att statuslampan blinkar en gång blått, en gång grönt.
- Nu skickar du det sms som du skrivit till Birth Alarm Premiums mobilnummer.
- Efter en liten stund får du ett status-sms från Birth Alarm Premium som en bekräftelse. Där står på den näst sista raden "CL:5", vilket anger att Birth Alarm Premium nu vid ett larm ringer hela listan fem gånger innan den slutar automatiskt.

#### 8.3.2 Ställa in tidpunkt för sms

Du kan ställa in om och när du vill ta emot ett sms-meddelande.

##### 8.3.2.1 Inget sms

- Gör på följande sätt om du INTE vill att Birth Alarm Premium skickar sms-meddelanden:
- Skriv ett sms på telefonen med följande innehåll: "**MS:0**" (Obs! Skriv **MS** med stora bokstäver)
- Se till att Birth Alarm Premium är i "Programmeringsläge" (**se 7.1**). Vänta till dess att statuslampan blinkar en gång blått, en gång grönt.
- Nu skickar du det sms som du skrivit till Birth Alarm Premiums mobilnummer.
- Efter en liten stund får du ett status-sms från Birth Alarm Premium som en bekräftelse. Där står på näst sista raden

### 8.3.2.2 Alltid sms

Gör på följande sätt om du vill att Birth Alarm Premium skickar ett sms vid varje larm:

- Skriv ett sms på telefonen med följande innehåll: "**MS:1**" (Obs! Skriv **MS** med stora bokstäver)
- Se till att Birth Alarm Premium är i "Programmeringsläge" (**se 7.1**). Vänta till dess att statuslampan blinkar en gång blått, en gång grönt.
- Nu skickar du det sms som du skrivit till Birth Alarm Premiums mobilnummer.
- Efter en liten stund får du ett status-sms från Birth Alarm Premium som en bekräftelse. Där står på den näst sista raden "**MS:1**", vilket anger att Birth Alarm Premium skickar ett status-sms efter varje uppringning.

### 8.3.2.3 Sms efter andra uppringningen

- Om du bara vill ha ett sms när Birth Alarm Premium ringt två gånger (vilket är standardinställningen för Birth Alarm Premium) gör du på följande sätt:
- Skriv ett sms på telefonen med följande innehåll: "**MS:2**" (Obs! Skriv **MS** med stora bokstäver)
- Se till att Birth Alarm Premium är i "Programmeringsläge" (**se 7.1**). Vänta till dess att statuslampan blinkar en gång blått, en gång grönt.
- Nu skickar du det sms som du skrivit till Birth Alarm Premiums mobilnummer.
- Efter en liten stund får du ett status-sms från Birth Alarm Premium som en bekräftelse. Där står på den näst sista raden "**MS:2**", vilket anger att Birth Alarm Premium skickar ett status-sms efter den andra uppringningen.

## 8.4 Återställa till standardinställningar

Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna genom att skicka ett sms med ordet "RESET" till Birth Alarm Premium. Då återställs alla inställningar till standardvärdena. De programmerade telefonnumren raderas inte.



## 9. Status-sms

Birth Alarm Premium skickar ett status-sms när du ändrat en inställning eller ett telefonnummer på Birth Alarm Premium, eller när du får ett följningslarm. Detta status-sms innehåller information om de aktuella inställningarna och de programmerade telefonnumren på Birth Alarm Premium. Det innehåller dessutom vissa mätvärden om stoet och om Birth Alarm Premium i sig.

	<b>Sms-meddelande:</b>	<b>Förklaring:</b>
Mätvärden	<b>Batteri 60 %</b> <b>Signal 51 %</b> <b>Vinkel: 65</b>	Återstående batterikapacitet Signalstyrka Uppmätt liggvinkel i grader
Inställningar	<b>Sms: 12</b> <b>M1: +31612345678</b> <b>M2: +31644332211</b> <b>M3:</b> <b>M4:</b> <b>AN:65</b> <b>MS:2 CL:2</b>	Antal redan skickade sms-meddelanden: 12 stycken Detta är det första telefonnumret som enheten ringer Detta är det andra telefonnumret som enheten ringer Det tredje telefonnumret (används ej i detta fall) Det fjärde telefonnumret (används ej i detta fall) Registreringsvinkeln är inställd på 65 grader Sms efter andra uppringningen. Det totala antalet gånger enheten ringer numren i listan är 2
	<b>SL:0</b>	Sovläget är avstängt (0)

- När batteriladdningen sjunker under 20 % måste du byta batterierna!
- Om du ser att signalstyrkan ibland är lägre än 20 % rekommenderar vi att välja en annan operatör som har bättre täckning på platsen där Birth Alarm Premium används.
- Antalet skickade sms ger en fingervisning om förbrukningen av samtalspotten eller samtalsminuterna.



"M1" står för "Memory 1". Engelska för "Minnesplats 1".



"AN" står för "Angle". Engelska för "Vinkel".



"MS" står för "Message". Engelska för "Meddelande".



"CL" står för "Calls". Engelska för "Samtal".



"SL" står för "Sleepmode". Engelska för "Sovläge".

## 10. Tester

Det är viktigt att du testar Birth Alarm Premium innan du börjar använda den, så att du är säker på att den fungerar ordentligt. De här testerna gör du enkelt på egen hand.

- Vi rekommenderar att du tar med dig Birth Alarm Premium till den plats där stoet befinner sig.
- Håll Birth Alarm Premium i handen och sätt på den så att statuslampan blinkar en gång var fjärde sekund.
- Vrid nu Birth Alarm Premium 90 grader så att en av de smala sidorna är vänd uppåt. (*Obs! Om du använder sovläget ska du också placera i Birth Alarm Premium horisontell position efter 15 sekunder.*)
- Statuslampan ska nu blinka orange.
- Efter några sekunder blir statuslampan blå, enheten etablerar kontakt med nätverket.
- Strax därpå ringer Birth Alarm Premium det nummer som är inprogrammerat på plats "M1".
- Besvara inte samtalet och tryck inte bort det med den röda knappen. Låt bara telefonen ringa.
- Birth Alarm Premium avslutar uppringningen av sig själv efter några sekunder.

Nu kan du avbryta Birth Alarm Premium genom att ringa tillbaka till den. Birth Alarm Premium kommer att avvisa ditt samtal, men du har nu avbrutit Birth Alarm Premiums larmläge. Birth Alarm Premium kommer då inte att ringa några andra nummer, såvida den inte förs tillbaka till en position som är under gränsvinkeln, och sedan återigen placeras i en position som överstiger gränsvinkeln.

Om Birth Alarm Premium fungerat som den ska vid testet kan du fästa enheten på stoet.



*Om du stöter på problem vid testet kan du felsöka enheten med hjälp av "Felsökning".*



*Du kan programmera Birth Alarm Premiums mobilnummer i din egen mobiltelefon, exempelvis med namnet "Sto" eller "BirthAlarm". Då ser du med en gång att det är Birth Alarm Premium som ringer, och då vet du att du inte behöver svara.*



*Svara aldrig när Birth Alarm Premium ringer till dig (oavsett om det sker vid programmering eller om det är ett riktigt följningslarm). Om du svarar när Birth Alarm Premium ringer debiterar operatören samtalskostnader och det är bortkastade pengar! Tryck inte heller bort samtalet (med den röda knappen) eftersom Birth Alarm Premium då kanske kopplas till röstbrevlådan.*

## 11 Montering på stoet

Om du vill sätta Birth Alarm Premium i sadelgjorden eller under grimman måste du fästa den medföljande hållaren, det gör du på följande sätt:

- Skjut in Birth Alarm Premium försiktigt i hållaren enligt fotot nedan.
- Se till att båda statuslamporna är väl synliga.
- Lås sedan fliken med det medföljande remlåset.



*I exemplet nedan är statuslamporna placerade i riktning mot remlåset, men det går också bra att placera dosan åt andra hållet. Detta påverkar inte funktionen.*




### 11.1 Montering under grimman

Om du vill sätta Birth Alarm Premium under grimman ska den monteras enligt anvisningarna nedan med tre buntband. Kontrollera att grimman sitter ganska stramt så att Birth Alarm Premium hänger mitt under stoets käke.



### 11.2 Montering i en anti-rulljord

Om du sätter Birth Alarm Premium i en anti-rulljord ska hållaren med Birth Alarm Premium monteras enligt bilden nedan. För att sätta fast den i en anti-rulljord krävs sex 6 buntband. Kontrollera att enheten är horisontellt placerad när stoet står rakt.

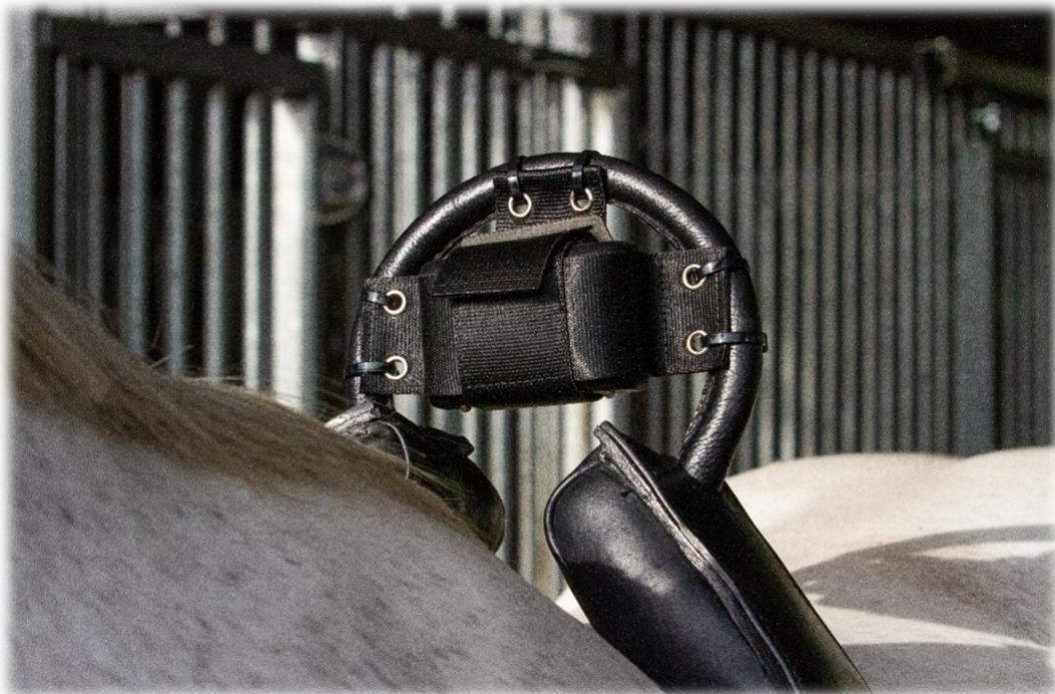



## 12 Sammanfattning och användningsätt

*Nedan följer en kort beskrivning av hur Birth Alarm Premium fungerar och hur den ska användas. Vi rekommenderar att du läser denna text.*

Birth Alarm Premium kontrollerar stoets kroppsposition var fjärde sekund. Däremellan befinner sig Birth Alarm Premium i ett energisparläge så att den inte drar batteri i onödan. När stoet får värkar och därför lägger sig ner utsträckt på golvet ringer Birth Alarm Premium till din mobiltelefon. Då ser du Birth Alarm Premiums telefonnummer på mobilens skärm. Om du sparar detta nummer på mobiltelefonen med ett namn som exempelvis "BirthAlarm" eller "Sto" ser du även detta på telefonens skärm. Då vet du alltså att det är Birth Alarm Premium som ringer. I vanliga fall brukar man svara när det ringer, men gör **inte** det i det här fallet! Om du inte svarar är meddelandet helt gratis eftersom samtalet inte kopplas fram. Efter några sekunder slutar Birth Alarm Premium automatiskt att ringa. Sedan kan du ringa tillbaka till Birth Alarm Premium (även det är kostnadsfritt). På så sätt visar du Birth Alarm Premium att du uppmärksammat att den ringt och då slutar Birth Alarm Premium att ringa. Birth Alarm Premium aktiveras sedan först efter en stund, om hästen lägger sig ner igen.

Om du inte ringer tillbaka till Birth Alarm Premium inom 30 sekunder, kommer Birth Alarm Premium att ringa det andra numret i minnet (om du har programmerat ytterligare ett nummer) och sedan återigen vänta 30 sekunder på en bekräftelse. På så sätt kan Birth Alarm Premium informera totalt fyra telefonnummer/personer om att stoet följar. Om Birth Alarm Premium har ringt samtliga nummer en gång utan att något av dessa har reagerat kommer Birth Alarm Premium att börja om genom att ringa det första numret. Efter det kommer Birth Alarm Premium också att skicka ett status-sms. Det är ett sms från Birth Alarm Premium med kortfattad information om liggvinkel, batterikapacitet, nätverkstäckning med mera. **(se 9)**

Tänk på att du också kan låta Birth Alarm Premium ringa till en fast telefon (din hemtelefon). Om den fasta telefonen är utrustad med en nummerpresentatör ser du alltså att det är Birth Alarm Premium som ringer. Om din fasta telefon saknar nummerpresentatör måste du besvara varje samtal. Du hör då en ljudsignal som gör att du kan identifiera Birth Alarm Premium. I så fall kopplas samtalet från Birth Alarm Premium fram och det betyder att ett mindre belopp dras från kontantkortet. Om du använder Birth Alarm Premium på detta sätt rekommenderar vi att du kontrollerar regelbundet att det finns pengar på kontantkortet. Se till att det är minst 100 kronor för säkerhets skull.

Systemet fungerar i regel i en månad på en ny uppsättning alkaliska batterier. Vi avråder bestämt från att använda uppladdningsbara eller billiga zink-kolbatterier!

## 13 Tekniska data

Matarspänning	4,5 V (3 st. AA alkaliska batterier)
Strömförbrukning	200 µA genomsnitt (1,3 A max.)
LTE-modul	LTE FDD B1/B8/B7/B8/B20/B28 WCDMA B1/B8 GSM/EDGE B3/B8
Minnen	4
Sovläge	Ja
Detektionsvinkel	Inställbar 65..80°
Meddelandetyper	Ringa/sms

**Garanti:** Upp till två år efter köpedatum. Gäller ej vid slag, vattenskada och/eller andra skador. Tillverkaren och importören är inte ansvariga för alla slags skador som kan uppstå vid användning av Birth Alarm Premium. Leverans och verksamhet sker enligt Gallagher Europe B.V.'s allmänna villkor

Gallagher Europe B.V. (NL) Bornholmstraat 62A 9723 AZ GRONINGEN Tel. 0031 (0)50 368 31 00 / Fax 0031 (0)50 306 16 55 E-mail: <a href="mailto:info.nl@gallaghereurope.com">info.nl@gallaghereurope.com</a>	
Gallagher Belgium b.v.b.a. (BE) Oude Baan 14 3945 HAM Tel. 013/66 77 66 / Fax 013/ 66 80 21 E-mail: <a href="mailto:info.be@gallaghereurope.com">info.be@gallaghereurope.com</a>	
Gallagher Europe (DE) Talstrasse 7 49479 Ibbenbüren Telefon: 05451/9444-0 / Fax: 05451/9444-33 E-mail: <a href="mailto:info.de@gallaghereurope.com">info.de@gallaghereurope.com</a>	

<p>Gallagher Europe (FR)          Miniparc du Verger          Bâtiment C - 1 rue de Terre Neuve          91940 LES ULIS          Tél. 0820 203 700 / Fax 0820 203 701          E-mail: <a href="mailto:info.fr@gallaghereurope.com">info.fr@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Europe (AT)          Hopfgarten 18          8741 Weisskirchen          Tel. +43 (0)3577/82200 / Fax. +43 (0)3577/80921          E-mail: <a href="mailto:info.at@gallaghereurope.com">info.at@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Schweiz AG (CH)          Zürcherstrasse 499          9015 St. Gallen          Tel. 071 / 313 29 50 / Fax. 071 / 313 29 60          E-mail: <a href="mailto:info@gallagherschweiz.ch">info@gallagherschweiz.ch</a></p>	
<p>Gallagher Powerfence UK Ltd.          Curriers Close, Canley          COVENTRY CV4 8AW          Tel. 0844 8500101 / Fax 0844 8501545          E-mail: <a href="mailto:info.uk@gallaghereurope.com">info.uk@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Sweden AB (SE)          Rönnaviksgatan 13          213 74 MALMÖ          Tel. 040-41 88 80 / Fax 040-41 88 88          E-post: <a href="mailto:info@gallagher.se">info@gallagher.se</a></p>	